

# ardo hands-free double pumpset

WELCHE GRÖSSE PASST?




99.04.528 / V01/03.2024

## Für das Ardo Hands-Free Double Pumpset

Die Brustglocke passt wenn:

- rund um die Brustwarze ca. 2 mm Platz frei bleibt
- die Brustwarze sich frei im Trichter bewegt und den rhythmischen Bewegungen der Pumpe folgen kann.
- sich kein Gewebe des Brustwarzenhofes im Trichter befindet.
- die Milch fließt und sich die Brust nach dem Abpumpen überall weich anfühlt.

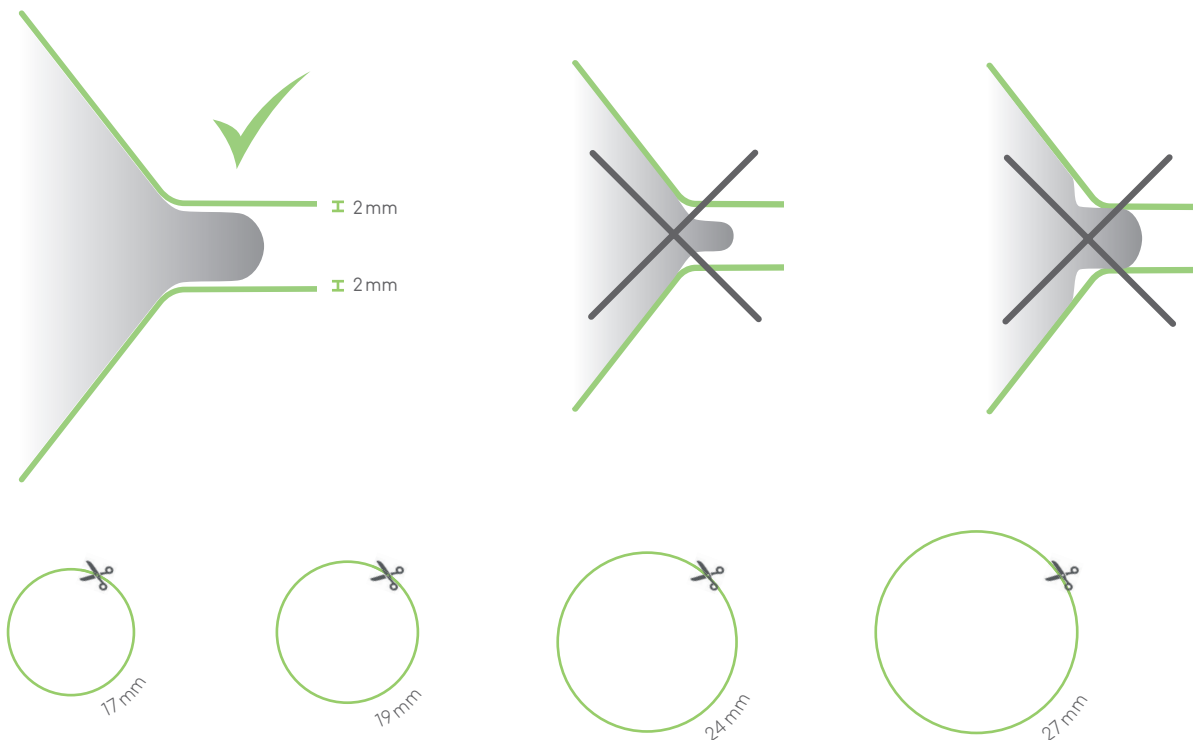

Bitte diese Vorlage im Druckermenü mit 100% Grösse ausdrucken.