

# Happy Mothers for Happy Babies

Aus Liebe zum Stillen



SWISS QUALITY 

 **ARDO**  
Hospital Recommended

Die Produkte von Ardo erleichtern der Mutter den Alltag, unterstützen sie bei Stillproblemen und ermöglichen einer Vertrauensperson das Füttern der Muttermilch.

Happy Mothers for Happy Babies



## Stillprodukte, die begeistern

Ardo erfüllt als bewährter Partner von Krankenhäusern und Stillberaterinnen seit Jahren höchste Anforderungen – zu Hause wie im Klinikalltag. Dabei steht die Mutter mit ihren Bedürfnissen stets im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Geburt eines Kindes bringt neben grosser Freude auch viel Veränderung und meist weniger Freizeit mit sich. Um einer "frischgebackenen Mutter" den Alltag zu erleichtern, entwickelt Ardo wohldurchdachte Produkte, die besonders in der Stillzeit stark entlasten und bei auftretenden Stillschwierigkeiten Unterstützung bieten.

### Ardo – aus Liebe zum Stillen

Die Sicherheit und Qualität aller Produkte liegen dem Schweizer Unternehmen sehr am Herzen, ebenso die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Ardo Stillhilfen können dazu beitragen, dass Mütter länger stillen. Deshalb fühlt sich das Unternehmen dem WHO-Kodex verpflichtet: Denn ein gutes Stillmanagement in den ersten Wochen kann Einfluss auf die langfristige Stillbeziehung haben.

#### Auf diese Vorteile ist Verlass

- Abgerundetes, durchdachtes Produktsortiment
- Hohe Hygieneanforderungen
- Verlässliche und bewährte Schweizer Qualität
- Hohe Fachkompetenz aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit Krankenhäusern
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis



## Ardo Milchpumpen

Ob manuell oder elektrisch, ob Einsteiger- oder Profipaket – Ardo Milchpumpen bieten exzellenten Komfort und erfüllen höchste Hygiene- und Sicherheitsanforderungen. Individuell anpassbar sind die Milchpumpen die bewährte Lösung für Krankenhäuser und den Heimgebrauch.

Für jede Frau das passende Produkt

Ardo hat für jede Frau das passende Produkt im Krankenhaus und für zu Hause. Die Milchpumpen arbeiten behutsam und effizient, sie sind unkompliziert und ermöglichen eine einfache Anwendung. Sie überzeugen durch ein ansprechendes, kompaktes Design und nicht zuletzt durch das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Ardo Milchpumpen helfen bei Still Schwierigkeiten und fördern das Wohlbefinden und die Flexibilität der Frau.

## "Vacuum Seal"-Technologie



Hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards durch das geschlossene Pumpsystem

Die validierte "Vacuum Seal"-Technologie garantiert eine 100-prozentige Hygienebarriere und stellt sicher, dass keine Muttermilch oder Verunreinigungen in den Verbindungsschlauch oder die Pumpe gelangen können. Dies verhindert zuverlässig die Kontamination der Muttermilch und schützt so vor Infektionen.



100 % Barrierschutz

# CARUM

MILCHPUMPE FÜR KLINIKEN UND VERMIETUNG

Zur Erfüllung der höchsten Ansprüche von Müttern und von Fachpersonen hat Ardo die Klinikmilchpumpe Carum entwickelt – sie ist leistungsstark, verlässlich und den unterschiedlichen Anforderungen von Müttern mit termin- und frühgeborenen Babies bestens gewachsen.




## Einzigartiger, individuell einstellbarer Stimulations- und Abpumpmodus

Die Klinikmilchpumpe Carum ist ein Multitalent: Sie ist stark, aber dennoch auch für sensitive Einsätze bestens geeignet. Auch für das Doppelpumpen ist die Carum dank der Zweikolben-Technik unschlagbar. Der einzigartig sanfte Wechsel zwischen Stimulations- und Abpumpmodus (manuell oder automatisch nach 2 Min.) und das grosse Farbdisplay mit intuitiver Menüführung verleihen der Klinikmilchpumpe weitere Beliebtheit. Das geschlossene Pumpsystem "Vacuum Seal" garantiert exzellente Sicherheit und Hygiene.

- Einfache Bedienung und Reinigung
- Leise in der Anwendung
- Saugstärke (Vakuum) und Frequenz (Zyklus) individuell und unabhängig voneinander wählbar, im Stimulationsmodus und im Abpumpmodus
- "Sensitive Programme" für schonendes Abpumpen bei schmerzhaften, wunden Brustwarzen
- Sanfter Wechsel vom Stimulations- in den Abpumpmodus (2-Phasen Milchpumpe)
- Zeitmessung / Stoppuhr
- Grosses Farbdisplay mit Dimmfunktion
- Mit Rollgestell erhältlich
- Als Mietpumpe einsetzbar



## "Individual Phases"

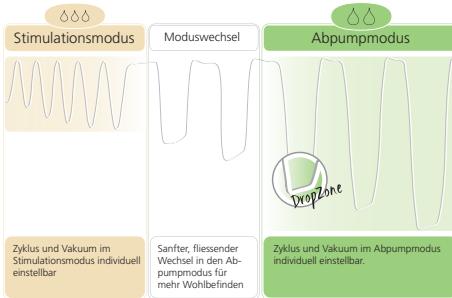

In der **"DropZone"** wird ein stabiles Vakuum auf eingestellter Höhe gehalten. Das fördert das kontinuierliche und ungehinderte Fließen der Muttermilch. Besonders bei einem tiefen Zyklus hilft die **"DropZone"** effizient abzupumpen, weil die Milch mehr Zeit hat zu fließen.

### Für Mütter, die selbst bestimmen möchten


Ardo Milchpumpen lassen sich jederzeit an die persönlichen Bedürfnisse der Mutter anpassen. Vakuumstärke und Zyklus sind komplett unabhängig voneinander regelbar.

Carum ist die erste Milchpumpe, bei der sowohl im Stimmulationsmodus als auch im Abpumpmodus Zyklus und Vakuum getrennt voneinander reguliert werden können.



## "Sensitive Programme"

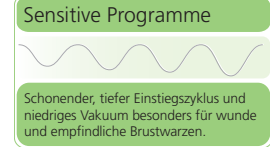

Im "Sensitive Programme" pumpt die professionelle Klinikmilchpumpe Carum mit einem kaum spürbaren Vakuum und Zyklus und ermöglicht so ein sanftes Abpumpen bei schmerzenden, wunden Brustwarzen. Zudem können die Einstellungen in kleinen Schritten dem Empfinden der Mutter angepasst werden.




### Bei wunden & empfindlichen Brustwarzen

Das sanfte und schonende Abpumpprogramm ist standardmäßig in jeder Carum vorhanden.


"Sensitive Programme" aktivieren:

1. Ein/Aus-Taste  betätigen
2. Modustaste  drücken während die Welcome-Seite angezeigt wird, so dass Carum ins „Sensitive Programme“ schaltet

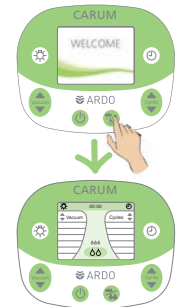


# CLINIC PUMPSET

PUMPSET FÜR KLINIKEN

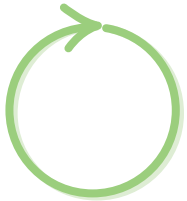


Mehrweg-Gebrauch

- Sterilisierbar
- Fünf Brustglockengrößen verfügbar (22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm, 36 mm)
- Ideal für die Vermietung von Milchpumpen
- Mit Hygienebarriere: 100-prozentige Kontaminationsbarriere dank "Vacuum Seal"-Technologie

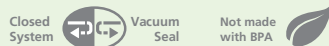


# ONE MUM PUMPSET 72 H

STERILES PUMPSET FÜR KLINIKEN

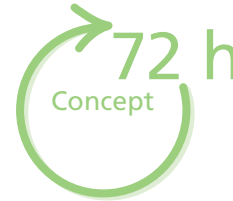

72 Stunden Gebrauch

- Kann 72 h ohne zu sterilisieren verwendet werden (validiertes Reinigungsverfahren)
- Einzel steril verpackt
- Fünf Brustglockengrößen verfügbar (22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm, 36 mm)
- Umweltschonende Mehrweglösung
- Mit Hygienebarriere: 100-prozentige Kontaminationsbarriere dank "Vacuum Seal"-Technologie
- Accessory Bag: wasch- und beschreibbarer Aufbewahrungsbeutel für zwei Pumpsets

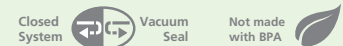



# CLINICARE PUMPSET

EINWEG- ODER 24 H-PUMPSET STERIL



Einmal- oder 24 Stunden Gebrauch

- Einmal- oder 24 h-Gebrauch (8 x pro Tag)
- Einzeln steril verpackt
- Drei Brustglockengrößen verfügbar (22 mm, 26 mm, 31 mm)
- Einziges Einweg-Pumpsystem mit in der Brustglocke integrierter Hygienebarriere: 100-prozentige Kontaminationsbarriere dank "Vacuum Seal"-Technologie
- Einfach in der Anwendung
- Accessory Bag: wasch- und beschreibbarer Aufbewahrungsbeutel für zwei Pumpsets

# CLINISTORE

EINWEGMILCHFLASCHEN FÜR KLINIKEN



Einmal-Gebrauch

- Erhältliche Versionen:
  - Steril, einzeln verpackt
  - Ready-to-Use, Bulkverpackung
- Abpumpen-Aufbewahren-Füttern
- Einmal-Gebrauch
- Kompatibel mit allen Ardo Pumpsets
- Vier Größen: 50 ml, 80 ml, 120 ml, 250 ml
- Standardisierter Flaschenhals
- Skalierung mit 1 ml Einheiten
- Skalierung 50 ml Kolostrumflasche beginnt bei 1 ml

# CALYPSO

ELEKTRISCHE MILCHPUMPE



## Die behutsame Milchpumpe

Für alle Mütter, die ihren Freiraum auch während der Stillzeit genießen wollen und höchsten Wert auf Flexibilität legen.

### Spielend einfach und überall abpumpen

Wenn eine Mutter regelmässig und über längere Zeit abpumpen will, dann ist die Milchpumpe Calypso das richtige Hilfsmittel. Die geräusch-arme Betriebsweise der Pumpe ermöglicht das angenehme und diskrete Abpumpen. Dennoch ist sie verblüffend saugstark. Weil die Milchpumpe so leise und behutsam ist, steht einer parallelen, anderweitigen Beschäftigung, wie z. B. telefonieren, nichts im Weg. Die Calypso erfüllt höchste Hygieneanforderungen und bringt der stillenden Mutter exzellente Sicherheit. Sie besticht mit ihrem ansprechenden und kompakten Design.

- Sehr leise
- Einfach und intuitiv zu verwenden
- Saugstärke (Vakuum) und Frequenz (Zyklus) individuell und unabhängig voneinander wählbar
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einzigartige Garantieleistung
- Effizient – mit der Calypso Double Plus nur halb so lange abpumpen



Closed System



Vacuum Seal

Ultra Silent and Gentle



Warranty Plus



Best Breastpump 2019



## In der halben Zeit abpumpen

Doppelpumpen mit Ardo-Produkten bedeutet, sanft und rasch die Milch beider Brüste zugleich abzupumpen. Das fördert die Milchproduktion und halbiert die benötigte Zeit.

### Vorteile Doppelpumpen vs. Einzelpumpen

Die Milchbildung kann durch Doppelpumpen optimal angeregt werden<sup>1,2,3</sup>. Mütter können daher signifikant mehr Muttermilch abpumpen. Zudem reduziert es die Pumpzeit um die Hälfte<sup>4,5</sup>. Dies ist vor allem für Mütter von Vorteil, die über längere Zeit abpumpen, so z. B. für berufstätige Mütter.

#### Literature

- <sup>1</sup> Jones E, Dimmock PW, Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85 F91-F95
- <sup>2</sup> Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. Effects of pumping style on milk production in mothers of non-nursing preterm infants. J. Hum Lact 1999; 15: 209-216
- <sup>3</sup> Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J. Hum Lact 1996; 12:193-199
- <sup>4</sup> Groh-Wargo S, Toth A, Mahoney K et al. The utility of bilateral breast pumping system for mothers of premature infants. Neonatal Netw 1995;14:31-36 JC
- <sup>5</sup> Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume and prolactin levels: a pilot study. J. Hum Lact 1996; 12: 193-199

## Einzigartige Garantie

Mit der erweiterten und vom Kaufdatum unabhängigen Garantie übernimmt Ardo als einziger Hersteller die volle Funktionsgarantie für eine Betriebsdauer von 400 Stunden.

### Garantie plus: 400 Stunden

Die Garantielaufzeit von 400 Stunden entspricht einer durchschnittlichen Abpumpzeit für zwei Säuglinge. Die erweiterte Garantie gilt solange die LED Lampe grün leuchtet.



# CALYPSO

ELEKTRISCHE MILCHPUMPE



Die Brustpumpe Calypso in ihrer Basisausführung ist der ideale und einfache Einstieg für "frischgebackene Mamas".

**Inhalt:** Calypso + Pumpset mit Brustglocke Ø 26 mm + Standfuss + Netzadapter

# CALYPSO DOUBLE PLUS

ELEKTRISCHE DOPPEL-MILCHPUMPE



Die Brustpumpe Calypso Double Plus ermöglicht das sanfte Abpumpen der Milch beider Brüste zugleich. Das fördert die Milchproduktion und halbiert die benötigte Abpumpzeit. Drei unterschiedlich grosse Brustglocken garantieren, dass fast jede Mutter die zur Brustwarze passende Grösse findet.

**Inhalt:** Calypso + 2 x Pumpset mit Brustglocke Ø 26 mm + Netzadapter + 2 x Optiflow + 2 x Brustglocke Ø 31 mm + 2 x Brustglockeneinsatz Ø 28 mm + Reinigungsbürste + Flaschenhalter

# CALYPSO-TO-GO

ELEKTRISCHE DOPPEL-MILCHPUMPE FÜR UNTERWEGS

inkl.  
Handmilch-  
pumpe



Die Brustpumpe Calypso-To-Go ermöglicht das sanfte Abpumpen beider Brüste zugleich – mit allem, was es unterwegs zum Abpumpen und Aufbewahren von Muttermilch braucht. Drei unterschiedlich grosse Brustglocken garantieren, dass fast jede Mutter die zur Brustwarze passende Grösse findet. Mit dem beiliegenden Handgriff lässt sich schnell und einfach eine Handmilchpumpe zusammenbauen.

**Inhalt:** Calypso + 2 x Pumpset mit Brustglocke Ø 26 mm + Netzadapter + 2 x Optiflow + 2 x Brustglocke Ø 31 mm + 2 x Brustglockeneinsatz Ø 28 mm + Reinigungsbürste + Flaschenhalter + 6 zusätzliche Flaschen + Stilltasche + Beutel + Kühltasche + Kühlelemente + Handgriff

# SINGLE PUMPSET

EINFACH-PUMPSET



**Inhalt:** Pumpset

# DOUBLE PUMPSET

DOPPEL-PUMPSET



**Inhalt:** 2 x Pumpset

# AMARYLL START

## HANDMILCHPUMPE

Die manuelle Milchpumpe Amaryll Start vereint höchste Qualität mit ergonomischem Design.

### Effizientes und angenehmes, manuelles Abpumpen

Die manuelle Milchpumpe Amaryll Start ist bei zahlreichen Müttern und Fachpersonen beliebt. Mit dem ergonomischen Hebel, der sich für Rechts- und Linkshänderinnen sowie Mütter mit kleinen Händen eignet, lassen sich die Saugstärke und die Saugfrequenz individuell einstellen. Somit können der Stimulationsmodus (hohe Saugfrequenz, niedriges Vakuum) und der Abpumpmodus (niedrige Saugfrequenz, hohes Vakuum) manuell erzeugt werden.



- Sanftes, manuelles Abpumpen
- Exzellente Sicherheit und Hygiene
- Ermüdungsarmes Abpumpen dank ergonomischem Design
- Stimulations- und Abpumpmodus können manuell erzeugt werden
- Handmilchpumpe mit Brustglocke 26 mm
- Weitere Brustglockenvarianten als Zubehör erhältlich

## Wahl der passenden Brustglocke


Jede Brust ist anders und deshalb ist es wichtig, die passende Brustglocke zu finden. Denn eine gut angepasste Brustglocke trägt wesentlich zum erfolgreichen Abpumpen bei.



### Individuell wählbar


#### Die Brustglockengrösse passt, wenn...

- die Brustwarze sich frei im Trichter bewegt und den rhythmischen Bewegungen der Pumpe folgen kann.
- sich kein oder nur wenig Gewebe des Brustwarzenhofes im Trichter befindet.
- die Milch fließt und die Brust sich nach dem Abpumpen überall weich anfühlt.

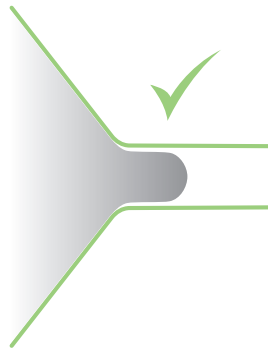

#### Die Brustglocke ist zu klein, wenn...

- die Brustwarze an der Trichterwand reibt.
- das Pumpen auch bei kleinem Vakuum unangenehm ist.
- die Milch nur langsam fließt.
- die Mutter weniger Muttermilch abpumpen kann als erwartet.

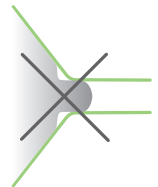

#### Die Brustglocke ist zu gross, wenn...

- der Warzenhof in den Trichter gesogen wird.
- das Abpumpen sich unangenehm anfühlt.





## Stillhilfen von Ardo

Die Stillzeit ist eine unvergessliche, aber auch intensive Zeit, in der Stillhilfen eine gute Unterstützung bieten.

### Einfache und praktische Produkte

Das Ardo-Sortiment umfasst alles, was den Stillalltag erleichtert und die Mutter entlastet – unter anderem bei Abwesenheit oder bei Stillproblemen.



# DAY & NIGHT PADS

EINWEG-STILLEINLAGEN

Die Day & Night Pads sorgen für maximale Sicherheit und Wohlbefinden am Tag und in der Nacht.

## Komfort und Schutz

Durch den einzigartigen Auslaufschutz garantieren die Day & Night Pads Sicherheit am Tag und in der Nacht. Die Stilleinlagen sind weich und angenehm und passen sich der Brust ausgezeichnet an. Zwei Haftstreifen garantieren einen sicheren Halt im BH. Die Kombination aus maximalem Schutz und angenehmem Hautgefühl begeistert Mütter in der Stillzeit.

**Inhalt:** 30 bzw. 60 Einweg-Stilleinlagen



- Seitlicher Auslaufschutz für mehr Sicherheit – Kleider jederzeit optimal geschützt vor auslaufender Milch
- Saugstark und angenehm zu tragen
- Ergonomisch durch 3D-Design
- Hoher Hygienefaktor, da einzeln verpackt

# LILYPADZ®

MEHRWEG-SILIKON-STILLEINLAGEN



Rundum trocken sein und sich wohlfühlen

- Nicht absorbierend
- Verhindern durch den konstanten Druck auf die Brustwarze diskret und effektiv, dass Muttermilch unerwünscht austritt
- Innovativ
- Bis zu 2 Monate nutzbar
- Aus atmungsaktivem und hautverträglichem Silikon
- Diskret und unsichtbar – auch beim Schwimmen, beim Sport oder unter dem Abendkleid

**Inhalt:** 2 Stilleinlagen

# TULIPS

BRUSTHÜTCHEN



Hilft bei Saug- und Anlegeproblemen

- Geeignet für ungewöhnliche Brustwarzenformen
- Schützt wunde und schmerzende Brustwarzen
- Weicher Schaft für die sensible Mundhöhle von Babys
- Maximaler Hautkontakt während des Stillens dank Tulpenform
- Aus hautverträglichem, geruchs- und geschmacksneutralem Silikon
- Ohne BPA hergestellt und Latex frei
- In 3 Größen erhältlich:  
S = 16 mm, M = 20 mm, L = 24 mm

**Inhalt:** 2 Brusthütchen Grösse S, M oder L, Aufbewahrungsbox

# TEMPERATURE PACK

ANATOMISCHE BRUSTKOMPRESSE



Für wohltuende Linderung

- Als Kälte- und Wärmekompressen anwendbar
- Grosszügige Aussparung verhindert Kontakt zur empfindlichen Brustwarze
- Anatomische Form lindert auch axilläre Verhärtungen
- Weicher Textilüberzug schützt die Haut – mehrfach verwendbar

**Inhalt:** 1 Kälte- und Wärmekompressen + 1 Textil-Überzug

# GOLD CREAM

LANOLIN BRUSTCREME



Für trockene und empfindliche Brustwarzen

- Pflegt Brustwarzen und schützt vor Austrocknung
- Fördert die feuchte Wundheilung bei empfindlichen und wunden Brustwarzen
- Hypoallergen
- Gute Hautverträglichkeit sowie geruchs- und geschmacksneutral

**Inhalt:** 10 ml bzw. 30 ml



# EASY STORE

MUTTERMILCHBEUTEL



## Muttermilch sicher aufbewahren

- Zur Aufbewahrung von Muttermilch im Kühlschrank oder Tiefkühlfach
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Gefüllter Beutel steht von alleine
- Stapelbar
- Für den einmaligen Gebrauch

**Inhalt:** 25 Beutel

# EASY FREEZE

MUTTERMILCHBEUTEL



Direkt in Beutel abpumpen

- Zur Aufbewahrung von Muttermilch im Kühlschrank oder Tiefkühlfach
- Direktes Abpumpen in den Beutel möglich
- Einzigartig: integrierter Wärmeindikator
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Gefüllter Beutel steht von alleine
- Stapelbar
- Für den einmaligen Gebrauch

**Inhalt:** 20 Beutel + 2 wiederverwendbare Verschlüsse

# EASY CLEAN

MIKROWELLENBEUTEL



Schnelle und sichere Reinigung

- Schnell und sicher Stillzubehör reinigen
- Einfache Handhabung
- 100 Anwendungen (je 20 Mal pro Beutel)
- Energie- und kostensparend

**Inhalt:** 5 Beutel = 100 Dampfreinigungen

## Praktisches Zubehör

### SINGLE/DOUBLE PUMPSET

EINFACH-/DOPPEL-PUMPSET

- Passend zu Carum oder Calypso
- 100-prozentige Kontaminationsbarriere dank "Vacuum Seal"-Technologie



### AMARYLL KOMBIKIT

UMWANDLUNGSKIT IN HANDMILCHPUMPE

Verwandelt das Ardo Pumpset preisgünstig in die Amaryll Handmilchpumpe.



### OPTIFLOW

AKTIVER MASSAGEEINSATZ

- Aktiver Massageeffekt
- Hilft besonders bei Milchstau um den Warzenhof
- Zum Abpumpen mit dem Optiflow wird die Brustglocke Ø 31 mm benötigt
- Weiches und anschmiegsames Silikon



### EASY CUP

FÜTTERUNGSBECHER

- Bei Saug- und Anlegeproblemen
- Füttern ohne Saugverwirrung
- Becher ohne Ausguss reduziert Aspirationsgefahr
- Ohne BPA hergestellt
- 50 ml mit Skalierung 5 ml



### ERSATZTEILE

ZUM PUMPSET

- **Service Kit Single**  
2 Lippenventile, Schlauchadapter, Vakuumpfopf
- **Service Kit**  
4 Lippenventile, 2 Schlauchadapter, 2 Vakuumpföpfe, 2 Schläuche



### BRUSTGLOCKEN

FÜR FAST JEDE BRUSTWARZE DIE RICHTIGE GRÖSSE

- Für optimales Abpumpen
- Erhältlich in den Grössen:  
22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm, 36 mm



## CLINISTORE

EINWEGMILCHFLASCHEN STERIL UND READY-TO-USE

- Steril, einzeln verpackt oder Ready-to-Use, Bulkverpackung
- Abpumpen-Aufbewahren-Füttern
- Ohne BPA hergestellt
- 4 Grössen: 50 ml, 80 ml, 120 ml, 250 ml



## GLASS BOTTLE

GLASFLASCHE FÜR KLINIKEN

- Sterilisierbar
- Mit Flaschendeckel
- 130 ml mit Skalierung 10 ml



## KOLOSTRUMFLASCHE

EINWEGMILCHFLASCHE STERIL UND READY-TO-USE

- Steril, einzeln verpackt oder Ready-to-Use, Bulkverpackung
- Abpumpen-Aufbewahren-Füttern
- Ohne BPA hergestellt
- Abgerundeter Boden für bessere Entnahme der Milch
- 50 ml mit Skalierung 1 ml



## STILLTASCHE

ATTRAKTIV UND PRAKTISCH

- Aus strapazierfähigem Material
- Praktische Innenfächer mit extra Fotofach
- Integrierte Kinderwagenbefestigung



## BOTTLE SET

FLASCHEN FÜR MUTTERMILCH

- Mehrwegflasche
- Ohne BPA hergestellt
- Flaschendeckel mit Einlage
- Standardisierter Flaschenhals
- 150 ml mit Skalierung 10 ml



## KÜHLTASCHE

SICHERER TRANSPORT VON MUTTERMILCH

- Strapazierfähige Kühltasche
- Aufbewahrung von Muttermilch bis zu 24 h
- 3 Kühlelemente inklusive





Ardo medical AG  
Gewerbstrasse 19  
6314 Unterägeri  
Schweiz

T +41 41 754 70 70  
F +41 41 754 70 71  
[www.ardo.ch](http://www.ardo.ch)

 **ARDO**  
Hospital Recommended