

www.fertilily.ch

UN AIUTO PER IL
CONCEPIMENTO




SEMPLICEMENTE GENIALE: FERTI·LILY, LA COPPETTA PER CONCEPIMENTO

La coppetta per concepimento FERTI·LILY aumenta le probabilità di concepimento a casa senza ricorrere a ormoni, medici o procedure cliniche, preservando l'intimità e il romanticismo.

FERTI·LILY si inserisce dopo l'eiaculazione, in modo da consentire al maggior numero possibile di spermatozoi di raggiungere la cervice e accedere all'utero.

Uso comodo e semplice: FERTI·LILY trattiene gli spermatozoi esattamente nel posto giusto, anche se andate in bagno o fate la doccia – potrete muovervi a liberamente dopo il rapporto.

La coppetta per concepimento è estremamente comoda da inserire, indossare e rimuovere. Può essere utilizzata fino a 6 mesi o 6 cicli mestruali e lasciata in posizione per almeno 20 minuti, fino a un massimo di 60 minuti, dopo il rapporto.

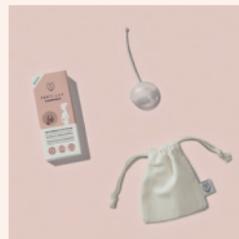



FERTI-LILY PROTEGGE GLI SPERMATOZOI

FERTI-LILY protegge gli spermatozoi riducendone l'esposizione all'ambiente vaginale, dove è presente un pH acido che ne rallenta l'attività.



COME FUNZIONA FERTI-LILY

Subito dopo l'eiaculazione del vostro partner, prendete FERTI-LILY senza sedervi o alzarvi in piedi, in modo da mantenere il liquido seminale all'interno della vagina. Capovolgete la coppetta in modo che assuma la forma di un ombrello e inseritela seguendo le istruzioni.



COME INSERIRE CORRETTAMENTE FERTI-LILY

Inserite la coppetta capovolta nella vagina. Una volta raggiunto il fondo del canale vaginale, mantenete la coppetta ferma in posizione utilizzando il dito con cui l'avete inserita, quindi tirate delicatamente lo stelo per fare tornare FERTI-LILY nella forma originale.



FATE L'AMORE



CAPOVOLGERE



INTRODURRE



TIRARE



ATTENDERE
20 MINUTI



RIMUOVERE



PULIRE

DISPONIBILE IN FARMACIA OPPURE ONLINE

CoF: 7781028 | Art. no. 63.00.375

CHF 49,50 | IVA escl.



99.04.375 | 10.2020 | V01

Distributore in Svizzera:
Ardo medical AG | Gewerbestrasse 19 | 6314 Unterägeri | Svizzera
T +41 (41) 754 70 70 | F +41 (41) 754 70 71 | www.fertilily.ch

 **ARDO**