

Recommandations de nettoyage

Compresse d'allaitement en silicone LilyPadz®

Nous avons constaté que les utilisatrices de LilyPadz® nettoyaient souvent leurs compresses avec du savon liquide de consommation courante. Or, presque tous les savons (liquides) et savons-crèmes contiennent des agents surgraissants dont l'action sur le silicone n'est pas optimale, même si leur pH est neutre. Pourquoi? Les agents surgraissants sont bénéfiques pour la peau mais pas pour les LilyPadz® dont ils réduisent très rapidement leurs propriétés d'adhérence.

Pour conserver les qualités d'adhérence des compresses en silicone le plus longtemps possible, il est important de nettoyer les LilyPadz® après chaque utilisation **à l'eau chaude avec un liquide vaisselle dégraissant au pH neutre**. Choisissez de préférence un liquide vaisselle sans parfum, ou du moins neutre pour l'odorat, pour éviter que votre enfant refuse le sein et l'allaitement. Le cas échéant, vous pouvez utiliser votre liquide nettoyant spécial biberons et tétines.

- Utiliser un liquide vaisselle dégraissant au pH neutre et sans parfum. Nettoyage uniquement au liquide vaisselle.
- Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre – ne pas essuyer.
- Il est possible de stériliser les compresses LilyPadz® de temps à autre (pas plus d'une minute et sans les coupelles protectrices). Une stérilisation fréquente est inutile et raccourcirait la durée d'utilisation du produit.
- Ne jamais mettre au lave-vaisselle ni au micro-ondes.

Si ces recommandations d'entretien sont respectées, les compresses LilyPadz® peuvent être utilisées plusieurs semaines d'affilée.



09.2015